



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**
Oznaczenie arkusza: **MED.06-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.06**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska**	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Górny łuk wargowy typu Schwarza – od strony przedsionkowej

1	Poziomy odcinek łuku przebiega równolegle do płaszczyzny zgryzu						
2	Poziomy odcinek łuku przebiega w połowie wysokości zębów siecznych						
3	Poziomy odcinek łuku przylega do najbardziej wysuniętych powierzchni wargowych zębów siecznych						
4	Poziomy odcinek łuku po stronie prawej zagina się pod kątem prostym między zębem 12 a 13						
5	Po prawej stronie łuk tworzy pętlę aktywacyjną nad zębem 13, która jest oddalona od modelu na około 1-2 mm						
6	Po prawej stronie szczyt pętli jest oddalony od szyjki zęba 13 na odległość około 2-3 mm						
7	Poziomy odcinek łuku po stronie lewej zagina się pod kątem prostym między zębem 22 a 23						
8	Po lewej stronie łuk tworzy pętlę aktywacyjną nad zębem 23, która jest oddalona od modelu na około 1-2 mm						
9	Po lewej stronie szczyt pętli jest oddalony od szyjki zęba 23 na odległość około 2-3 mm						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Górny łuk wargowy typu Schwarza – od strony podniebiennej

1	Po prawej stronie koniec łuku zakończony jest retencją (np. wężykiem, pętelką)						
2	Po prawej stronie łuk przechodzi na stronę podniebienną w przestrzeniach między zębami 13 a 14						
3	Po prawej stronie zakończenie łuku jest oddalone od modelu na około 1-2 mm						
4	Po lewej stronie koniec łuku zakończony jest retencją (np. wężykiem, pętelką)						
5	Po lewej stronie łuk przechodzi na stronę podniebienną w przestrzeniach między zębami 23 a 24						
6	Po lewej stronie zakończenie łuku jest oddalone od modelu o około 1-2 mm						

Rezultat 3: Górne sprężyny Coffina umieszczone na odciążeniu woskowym

1	Górna przednia sprężyna przypomina kształtem omegę i jest symetryczna						
2	Górna przednia sprężyna zakończona jest retencją (np. wężykiem, pętelką)						
3	Górna tylna sprężyna przypomina kształtem omegę i jest symetryczna						
4	Górna tylna sprężyna zakończona jest retencją (np. wężykiem, pętelką)						
5	Górna przednia i tylna sprężyna są zbliżone kształtem i wielkością						
6	Na górnym modelu sprężyny Coffina są przyklejone w linii szwu podniebiennego						
7	Na górnym modelu ramiona przedniej sprężyny Coffina są przyklejone w granicy linii za kłami						
8	Na górnym modelu ramiona tylnej sprężyny Coffina są przyklejone w granicy linii za pierwszymi zębami trzonowymi						
9	Na górnym modelu odległość między szczytem sprężyny przedniej i szczytem sprężyny tylnej to około 3 mm						
10	Zakończenia przedniej i tylnej sprężyny na górnym modelu są oddalone od niego o około 1-2 mm						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Dolna sprężyna Coffina umieszczona na odciążeniu woskowym							
1	Dolna sprężyna przypomina kształtem omegę i jest symetryczna						
2	Dolna sprężyna zakończona jest retencją (np. wężykiem, pętelką)						
3	Na dolnym modelu sprężyna jest przyklejona w linii między zębami siecznymi przyśrodkowymi						
4	Zakończenia sprężyny na dolnym modelu są oddalone od niego o około 1-2 mm						
Rezultat 5: Odciążenia woskowe na modelach roboczych							
1	Odciążenia woskowe są wykonane z wosku modelowego						
2	Odciążenia woskowe mają grubość około 1-2 mm						
3	Na górnym modelu szerokość odciążenia woskowego wyznacza szerokość zębów siecznych przyśrodkowych						
4	Na górnym modelu długość odciążenia woskowego z przodu wyznacza linia za kłami						
5	Na górnym modelu długość odciążenia woskowego z tyłu wyznacza linia za pierwszymi zębami trzonowymi						
6	Na dolnym modelu szerokość odciążenia woskowego wyznacza szerokość zębów siecznych						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie odciążeń na modelach roboczych oraz dogięcie elementów drucianych do aparatu Stockfisch						
Zdający:						
1	zarysował ołówkiem zasięg odciążeń na modelach roboczych					
2	doginał elementy z drutu za pomocą kleszczy protetycznych					
3	obcinał drut w bezpieczny sposób tzn. trzymając wolne końce drutu w rękach lub wykonując tę czynność pod blatem stołu protetycznego					
4	wycinał paski z wosku modelowego i uplastyczniał je nad palnikiem					
5	dociskał woskowe paski do modeli roboczych i odcinał ich nadmiar przy użyciu inlay'a lub nożyka do wosku					
6	przyklejał obrzeża ukształtowanych woskowych odciążeń do modeli roboczych przy użyciu rozgrzanego inlay'a lub nożyka do wosku					
7	przyklejał sprężyny Coffina do odciążeń na modelach roboczych woskiem modelowym					
8	przyklejał łuk wargowy do modelu od strony przedsionkowej woskiem modelowym					
9	w trakcie pracy utrzymywał palnik w bezpiecznej odległości					
10	uporządkował stanowisko pracy po wykonaniu zadania					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis