

**EGZAMIN ZAWODOWY  
Rok 2022  
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**  
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-22.06-SG**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka  –

Kod egzaminatora

Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu  :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił**Rezultat 1: Protokół zdawczo-odbiorczy***Wpisane w Kolumnie:*

1	A: Zestaw do zespolenia kości, Napęd ortopedyczny Stryker, Kleszczyki Pean, Wziernik ginekologiczny, Układ rur oddechowych z łącznikiem, Resuscytator silikonowy, Łyżka laryngoskopowa, Ostrze do napędu								
2	B: 4 razy Blok Operacyjny, 3 razy Oddz. IOM, 1 raz Oddział Położniczy								
3	C: 7 razy: TAK								
4	C: dla Ostrza do napędu: NIE								
5	D: dla Kleszczyków Pean: 4								
6	D: dla Wziernika ginekologicznego: 3								
7	D: dla Łyżki laryngoskopowej: 2								
8	E: dla Kleszczyków Pean oraz dla Łyżki laryngoskopowej: TAK /1 szt. NAPRAWA lub KASACJA								
9	E: dla Ostrza do napędu: TAK/ 3 szt. UTYLIZACJA								
10	F: dla układu rur oddechowych z łącznikiem: wielokrotnego użycia/ termolabilny oraz dla ostrza do napędu: jednorazowego użycia/ nie podlega dekontaminacji								

Numer  
stanowiska


**Rezultat 2: Karta dekontaminacji***Wpisane w Kolumnie:*

1	A: wyłącznie 7 pozycji						
2	C: TAK wyłącznie dla Wziernika ginekologicznego						
3	D: 6 razy sterylizacja parowa						
4	D: tlenkiem etylenu lub sterylizacja tlenkiem etylenu wyłącznie dla Układu rur oddechowych z łącznikiem						
5	E: 6 razy 90°C, 5 minut						
6	E: 55°C wyłącznie dla Układu rur oddechowych z łącznikiem						
7	F: dla Zestawu do zespolenia kości: kontener sterylizacyjny oraz dla Napędu ortopedycznego Stryker: dwie warstwy włókniny sterylizacyjnej						
8	G: dla Zestawu do zespolenia kości: 460 oraz dla Napędu ortopedycznego Stryker: 370						
9	G: dla Kleszczyków Pean i Wziernika ginekologicznego: 330 oraz dla Układu rur oddechowych z łącznikiem: 430						
10	H: dla Resuscytatora silikonowego: 2 miesiące oraz dla Łyżki laryngoskopowej 3 miesiące						

**Rezultat 3: Protokół niezgodności***W R.3.5 dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryterium pod warunkiem poprawności merytorycznej.**Wpisane:*

1	Protokół niezgodności z dnia: data egzaminu						
2	Nazwa wyrobu medycznego/zestawu: Wziernik ginekologiczny						
3	Użytkownik wyrobu medycznego/ zestawu: Oddział Położniczy						
4	Opis niezgodności: brak 2 szt. wzierników ginekologicznych						
5	O niezgodności powiadomiono: personel Oddziału Położniczego/ pielęgniarkę oddziałową/ kierownika Oddziału Położniczego/ położną/ kierownika Centralnej Sterylizatorni						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 4: Test funkcyjny zgrzewarki**

1	W miejscu do tego przeznaczonym wpisana jest data wykonania testu (data egzaminu)						
2	Zgrzew na całej jego szerokości jest ciągły, nie ma przerw, kanałów i rys						

**Rezultat 5: Pakiet z Zestawem do usuwania szwów oznakowany Etykietą***Oceniając kryterium R.5.4 Egzaminator może korzystać z linijki znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym*

1	Wewnątrz pakietu znajduje się Zestaw w składzie: pęseta chirurgiczna – 1 szt., pęseta anatomiczna – 1 szt., nożyczki chirurgiczne – 1szt. kleszczyki Pean – 1 szt.						
2	Ostrze nożyczek chirurgicznych zabezpieczone jest osłonką						
3	Zestaw zapakowany jest w rękaw papierowo-foliowy, zgrzewy zamykające pakiet są ciągłe na całej szerokości, bez kanałów i rys						
4	Odległość pomiędzy końcem pakietu a zgrzewem od strony otwarcia ma co najmniej 2 cm						
5	Uchwyty narzędzi wchodzących w skład Zestawu do usuwania szwów skierowane są w kierunku otwierania pakietu, na pakiecie nie ma plam pochodzących z oleju do konserwacji narzędzi						
6	Wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny typu 4 (wieloparametrowy)						
7	Etykieta przyklejona jest do pakietu taśmą bez wskaźnika						
8	Etykieta Nazwa odbiorcy: Oddział Ortopedyczny						
9	Etykieta Data Sterylizacji: data egzaminu						
10	Etykieta Data ważności: 24 miesiące lub 2 lata od daty egzaminu						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Wykonanie testu funkcyjnego zgrzewarki i przygotowanie pakietu z Zestawem do usuwania szwów do sterylizacji**

Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	założył czepek ochronny zakrywając nim wszystkie włosy, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtórzył każdy z sześciu etapów minimum pięciokrotnie, w jednym z etapów pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami								
2	wykonał test w taki sposób, aby zgrzew w całości znajdował się w polu przeznaczonym do jego kontroli i nie wchodził w pole przeznaczone do wypełnienia								
3	sprawił pod lampą powiększającą czystość 4 sztuk narzędzi								
4	naniósł olej konserwujący na przeguby nożyczek chirurgicznych i kleszczyków Pean								
5	wykonał ruchy otwierania i zamykania nożyczek chirurgicznych i kleszczyków Pean								
6	po konserwacji wykonał test funkcyjny nożyczek - sprawdził ostrość cięcia wykonując minimum 3 cięcia na kompresie gazowym								
7	po wykonaniu pakietu uporządkował stanowisko pracy, na blacie nie pozostawił odpadów z rękawa papierowo-foliowego, zużytych kompresów, wykonał dezynfekcję stanowiska chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym								
8	zjął czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady								

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*