

**EGZAMIN ZAWODOWY  
Rok 2024  
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**  
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-24.06-SG**  
 Symbol kwalifikacji: **MED.12**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka       –

Kod egzaminatora

Data egzaminu          
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił**Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji***Wpisane w kolumnie:*

1	<b>C:</b> dla Dłuta - 5; dla Nożyczek naczyniowych - 9; dla Światłowodu - 5;								
2	<b>D:</b> 2 x Oddział IOM, 4 x BO Urazowy								
3	<b>E:</b> Nr 2 dla dwóch pozycji: Bronchofiberoskopu oraz Nasofiberoskopu								
4	<b>F:</b> 60°C, 5 min dla Bronchofiberoskopu oraz Nasofiberoskopu								
5	<b>F:</b> 93°C, 10 min dla Kerisona oraz dla Sondy neurochirurgicznej								
6	<b>G:</b> 8 x Nr 5								
7	<b>H:</b> Nr 1 dla Kerisona oraz Sondy neurochirurgicznej								
8	<b>G:</b> dla bronchofiberoskopu i nasofiberoskopu: Nr 3								

**Rezultat 2: Protokół niezgodności***Wpisane w kolumnie:*

1	<b>A:</b> Dłuto, Nożyczki naczyniowe, Światłowód								
2	<b>B:</b> dla Dłuta - 1 szt., dla Nożyczek naczyniowych - 3 szt., dla Światłowodu - 2 szt.								
3	<b>C:</b> dla Dłuta - zadziory i wyszczerbienia i/lub uszkodzenie mechaniczne								
4	<b>C:</b> dla Nożyczek naczyniowych - tępe								
5	<b>C:</b> dla Światłowodu - liczne plamy i zaciemnienia obrazu								

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3: Karta sterylizacji***Wpisane w kolumnie:*

1	<b>B:</b> dla Dłuta: 4; dla Nożyczek naczyniowych: 6						
2	<b>B:</b> dla Światłowodu: 3						
3	<b>C:</b> dla Kerisona oraz dla Sondy neurochirurgicznej: Metoda: parą wodną/parowa, Temp.134 °C, Czas 18 min						
4	<b>C:</b> dla Bronchofiberoskopu, Wideolaparoskopu oraz Nasofiberoskopu: Metoda: tlenkiem etylenu/EO, Temp. 55 °C, Czas 60 min						
5	<b>D:</b> 3 x Nr 4						
6	<b>D:</b> dla Kerisona oraz Sondy neurochirurgicznej - Nr 7;						
7	<b>D:</b> 5 x Nr 2						
8	<b>E:</b> 3 x Nr 6						
9	<b>E:</b> 7 x Nr 9						

**Rezultat 4: Pakiet z Zestawem diagnostycznym***Egzaminator w celu oceny: R.4.3, R.4.4, R.4.5 otwiera pakiet*

1	Zestaw zapakowany jest metodą skośną w dwie warstwy włókniny sterylizacyjnej						
2	Pakiet zamknięty jest taśmami: ze wskaźnikiem oraz bez wskaźnika lub tylko taśmą ze wskaźnikiem						
3	Wewnątrz pakietu na tacy narzędziowej umieszczone są: wziernik nosowy, szpatułka metalowa, pęseta anatomiczna						
4	W pakiecie znajduje się wskaźnik chemiczny wieloparametrowy typu 4						
5	Uchwyty narzędzi skierowane są w jednym kierunku						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 5: Etykieta***Wpisane:*

1	<b>Nazwa zestawu:</b> Zestaw diagnostyczny						
2	<b>Odbiorca:</b> Poradnia Otolaryngologiczna						
3	<b>Data sterylizacji pakietu:</b> Data egzaminu zapisana w formacie dd-mm-rrrr						
4	<b>Data ważności pakietu:</b> Data o 1 rok dłuższa od daty egzaminu (+/- 2 dni) zapisana w formacie dd-mm-rrrr						

**Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i przygotowanie narzędzi do sterylizacji zgodnie z procedurą**  
*Zdający zgłosi przez podniesienie ręki. Zadanie wykona w obecności egzaminatora.*

*Zdający:*

1	założył czepek, zakrywając nim wszystkie włosy, nie miał założonej biżuterii i zegarka, pobrał środek dezynfekcyjny na suche dłonie, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie, w jednym z etapów pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami						
2	wybrał z zestawu narzędzi: wziernik nosowy, szpatułkę metalową, pęsetę anatomiczną						
3	skontrolował wizualnie czystość trzech narzędzi						
4	wykonał konserwację nanosząc środek konserwujący na przeguby dwóch narzędzi oraz wykonał ruchy zamykania i otwierania tych narzędzi						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 2: Pakowanie Zestawu diagnostycznego***Kontynuacja oceny przez Egzaminatora.***Zdający:**

1	rozłożył na blacie stołu dwa arkusze włókniny sterylizacyjnej w dwóch różnych kolorach i umieścił tacę narzędziową z zestawem narzędzi po przekątnej na środku pierwszego arkusza włókniny sterylizacyjnej						
2	zawinął pierwszy arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi, po zapakowaniu tacy pozostawił wypustkę z jednego z narożników włókniny sterylizacyjnej						
3	tacę narzędziową zapakowaną w pierwszy arkusz włókniny sterylizacyjnej umieścił po przekątnej drugiego arkusza włókniny i zawinął drugą warstwę zakrywając zapakowaną tacę narzędziową, po zapakowaniu pozostawił wypustkę z jednego z narożników włókniny						
4	uporządkował stanowisko pracy, wykonał dezynfekcję blatu stanowiska do pakowania narzędzi za pomocą chusteczki dezynfekcyjnej, chusteczkę wyrzucił do kosza na odpady						
5	zdział czepek i wyrzucił do kosza na odpady						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*