



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji maszynowej oraz Karta mycia i dezynfekcji manualnej

Wpisane:

1	Karta mycia i dezynfekcji maszynowej A wyłącznie: Zestaw do cholecystektomii, Laparoskop, Zestaw do wenesekcji, Resuscytator silikonowy						
2	Karta mycia i dezynfekcji maszynowej B: dla Zestawu do cholecystektomii, Laparoskopu, Resuscytatora silikonowego - 2, dla Zestawu do wenesekcji - 1						
3	Karta mycia i dezynfekcji maszynowej C: MD nr 1/31 D: 93 °C/10 minut - dla Zestawu do cholecystektomii i Zestawu do wenesekcji						
4	Karta mycia i dezynfekcji maszynowej C: MD nr 2/32 D: 90 °C/5 minut - dla Laparoskopu; C: MD nr 3/33 D: 90 °C/5 minut - dla Resuscytatora silikonowego						
5	Karta mycia i dezynfekcji maszynowej E: dla Zestawu do cholecystektomii i Zestawu do wenesekcji - wskaźnik nr 3						
6	Karta mycia i dezynfekcji maszynowej E: dla Laparoskopu wskaźnik nr 6, E: dla Resuscytatora silikonowego - wskaźnik nr 3 i/lub wskaźnik nr 6						
7	Karta mycia i dezynfekcji maszynowej F: dla Zestawu do cholecystektomii i Zestawu do wenesekcji - wskaźnik nr 4						
8	Karta mycia i dezynfekcji maszynowej F: dla Laparoskopu i Resuscytatora silikonowego - wskaźnik nr 2						
9	Karta mycia i dezynfekcji manualnej A: Zestaw ortopedyczny mały, B: 5						
10	Karta mycia i dezynfekcji manualnej C: Viruton Extra, 1%, 15 minut						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Karta sterylizacji parowej						
<i>Wpisane w kolumnie:</i>						
1	A: <u>wyłącznie</u> : Zestaw do cholecystektomii, Laparoskop, Zestaw do wenessekcji, Resuscytator silikonowy, Zestaw ortopedyczny mały					
2	C: A nr 1/41 - dla Zestawu do cholecystektomii, Zestawu do wenessekcji, Zestawu ortopedycznego małego					
3	C: A nr 2/42 - dla Laparoskopu i Resuscytatora silikonowego					
4	D: wskaźnik nr 8 i/lub nr 1					
5	E: wskaźnik nr 1					
6	F: wskaźnik nr 10					
Rezultat 3: Karta sterylizacji niskotemperaturowej						
<i>Wpisane w kolumnie:</i>						
1	A: <u>wyłącznie</u> : Maski silikonowe, Układ rur oddechowych					
2	C: metoda sterylizacji - tlenkiem etylenu/EO, czas degazacji - 12 godzin					
3	E: wskaźnik nr 7					
4	F: wskaźnik nr 5					

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Pakiet z Zestawem ortopedycznym małym i Etykieta

1	wewnątrz pakietu znajduje się taca z 5 szt. narzędzi - pęsetą chirurgiczną, kleszczykami Kocher, kleszczykami okienkowymi, łyżką kostną, odgryzaczem kostnym						
2	kleszczyki Kocher i kleszczyki okienkowe są otwarte lub związane na pierwszy ząbek zapadki						
3	uchwyty wszystkich narzędzi skierowane są w jednym kierunku						
4	wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny reagujący na wszystkie parametry krytyczne dla określonych cykli sterylizacji (typu 6)						
5	<i>Etykieta Nazwa zestawu: Zestaw ortopedyczny mały, Odbiorca: Oddział Pomocy Doraźnej</i>						
6	<i>Etykieta Data ważności pakietu: 4 miesiące od daty egzaminu +/- 2 dni w formacie dd-mm-rrrr</i>						

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, przygotowanie roztworu preparatu Viruton Extra i wykonanie dezynfekcji narzędzi*Zdający zgłosi gotowość do wykonania przez podniesienie ręki.**Zdający wykona w obecności Egzaminatora.**Zdający:*

1	przed przystąpieniem do pracy wykonał higieniczną dezynfekcję rąk techniką Ayliffe'a, wykonując 6 etapów dezynfekcji, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie						
2	założył środki ochrony indywidualnej: czepek, maseczkę ochronną, przyłbicę lub okulary ochronne, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, rękawiczki						
3	odmierzył w wanience dezynfekcyjnej 2970 ml wody						
4	wlał do wody w wanience 30 ml koncentratu preparatu dezynfekcyjnego, zamieszał roztwór roboczy mieszadłem						
5	zanurzył w roztworze 5 szt. narzędzi: pęsetę chirurgiczną, łyżkę kostną, odgryzacz kostny oraz otwarte: kleszczyki Kocher, kleszczyki okienkowe						
6	zamknął wanienkę pokrywą, odczekał czas dezynfekcji <i>Uwaga: czas dezynfekcji wynosi 15 minut, egzaminator na potrzeby egzaminu może skrócić czas dezynfekcji</i>						
7	wypłukał narzędzia wodą demineralizowaną						
8	osuszył i odłożył narzędzia na tacę narzędziową						
9	wylał roztwór roboczy, wypłukał pod bieżącą wodą wszystkie elementy wanienki dezynfekcyjnej, osuszył ręcznikami jednorazowymi, zdezynfekował wanienkę dezynfekcyjną oraz suchy blat roboczy						
10	zjął środki ochrony indywidualnej, zaczynając od rękawiczek i fartuchów, umieścił je w pojemniku na odpady z czerwonym workiem, wykonał higieniczną dezynfekcję rąk techniką Ayliffe'a						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przygotowanie narzędzi do sterylizacji <i>Zdający wykona w obecności Egzaminatora.</i>						
<i>Zdający:</i>						
1	wykonywał czynności w założonym czepku, zdezynfekował blat stołu chusteczkami dezynfekcyjnymi					
2	skompletował narzędzia, wykonał wzrokową kontrolę czystości 5 szt. narzędzi pod lampą powiększającą					
3	naniósł na przeguby wyłącznie 3 szt. narzędzi: kleszczyków Kocher, kleszczyków okienkowych i odgryzacza kostnego olej do konserwacji, wykonał kilkakrotnie ruchy zamykania i otwierania każdym narzędziem					
Przebieg 3: Pakowanie tacy z Zestawem ortopedycznym małym we włókninę sterylizacyjną <i>Zdający wykona w obecności Egzaminatora.</i>						
<i>Zdający:</i>						
1	rozłożył na blacie stołu dwa arkusze włókniny sterylizacyjnej w dwóch różnych kolorach					
2	umieścił tacę z Zestawem ortopedycznym małym po przekątnej na środku pierwszego arkusza włókniny sterylizacyjnej					
3	zawinął pierwszy arkusz, zakrywając tacę					
4	po zakończeniu pakowania pierwszej warstwy pozostawił wypustkę z włókniny ułatwiającą aseptyczne otwarcie pakietu, nie zakleił pierwszej warstwy opakowania taśmą					
5	tacę narzędziową z Zestawem ortopedycznym małym zapakowaną w pierwszy arkusz włókniny sterylizacyjnej umieścił po przekątnej drugiego arkusza włókniny i zawinął zakrywając drugą warstwą					
6	po zapakowaniu pozostawił wypustkę z jednego z narożników włókniny, ułatwiającą aseptyczne otwarcie pakietu					
7	pakiet zakleił taśmą ze wskaźnikiem po dwóch stronach pakietu					
8	uporządkował stanowisko pracy, wykonał dezynfekcję blatu stanowiska do pakowania narzędzi za pomocą chusteczki dezynfekcyjnej, zdjął czepkę i umieścił go w pojemniku na odpady					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis