



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny								Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji													
Zapisane:													
1	w nagłówku dokumentu: data zgodna z datą egzaminu w formacie dd-mm-rrrr												
2	kolumna A: MD nr 1 /4834												
3	kolumna B: A0 = 3000												
4	kolumna C: TAK												
Rezultat 2: Karta sterylizacji													
Zapisane:													
1	w nagłówku dokumentu: data zgodna z datą egzaminu w formacie dd-mm-rrrr												
2	w kolumnie A wyłącznie: Zestaw zabiegowy; Miska nerkowata												
3	w kolumnie B dla Zestawu zabiegowego: podwójna warstwa rękawa papierowo-foliowego												
4	w kolumnie B dla Miski nerkowatej: rękaw papierowo-foliowy												
5	w kolumnie C: Temp.134 °C, Czas 7 min.; Ciśnienie 2 atm. lub Temp.121 °C; Czas 20 min.; Ciśnienie 1 atm.												
6	w kolumnie D dla Zestawu zabiegowego: Nazwa wskaźnika: zintegrowany Typ 5												
7	w kolumnie D dla Miski nerkowatej: Nazwa wskaźnika: wieloparametrowy Typ 4												
8	w kolumnie E: zaznaczono Geobacillus stearothermophilus												
9	w kolumnie F: zaznaczono Prawidłowy												

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Etykieta I i Etykieta II*Zapisane:*

1	Etykieta I – w wierszu Nazwa zestawu: Zestaw zabiegowy; w wierszu Użytkownik: Blok Operacyjny						
2	Etykieta I – w wierszu Data sterylizacji: data zgodna z datą egzaminu w formacie dd-mm-rrrr; w wierszu Data ważności: data 1 rok po dacie egzaminu w formacie dd-mm-rrrr +/- 2 dni od daty egzaminu						
3	Etykieta II – w wierszu Zawartość pakietu: Miska nerkowata; w wierszu Użytkownik: Blok Operacyjny						
4	Etykieta II – w wierszu Data sterylizacji: data zgodna z datą egzaminu w formacie dd-mm-rrrr; w wierszu Data ważności: data 1 rok po dacie egzaminu w formacie dd-mm-rrrr +/- 2 dni od daty egzaminu						

Rezultat 4: Pakiet z zestawem zabiegowym i pakiet z miską nerkowatą*Uwaga. Do oceny R.4.1-R.4.9 należy otworzyć pakiet*

1	Wewnątrz jednego pakietu znajduje się Zestaw zabiegowy składający się z haka chirurgicznego Farabeuf, kleszczyków Allis, kleszczyków Kocher oraz odgryzacza kostnego jednoprzegubowego						
2	Zestaw zabiegowy zapakowany jest w dwie warstwy rękawa papierowo-foliowego zgodnie z zasadą papier do papieru, folia do folii						
3	W Zestawie zabiegowym każda warstwa rękawa zgrzana jest z dwóch stron, warstwa wewnętrzna nie jest podwinięta z żadnej strony						
4	Wewnątrz drugiego pakietu znajduje się miska nerkowata						
5	Zgrzewy obu pakietów są ciągłe na całej szerokości, bez kanałów, pęcherzyków powietrza i rys						
6	Odległość pomiędzy końcem pakietów a zgrzewem od strony otwarcia ma co najmniej 2 cm						
7	Wewnątrz pakietu z Zestawem zabiegowym, w pierwszej warstwie znajduje się widoczny wskaźnik chemiczny typu 5						
8	Wewnątrz pakietu z Miską nerkowatą znajduje się widoczny wskaźnik chemiczny typu 4						
9	Każdy z pakietów wygląda estetycznie, nie jest zaplamiony środkiem konserwującym, nie jest pognieciony						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i testu funkcyjnego zgrzewarki*Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.**Zdający:*

1	założył czepek, zakrywając nim włosy, przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii, zegarka						
2	wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap pięciokrotnie, w jednym z etapów pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami						
3	wykonał test funkcyjny zgrzewarki przed zgrzaniem pakietu						
4	opisał test funkcyjny zgrzewarki: data wykonania zgodna z datą egzaminu, temperatura zgrzewu minimum 160 °C, zatwierdzenie TAK/OK						

Przebieg 2: Przygotowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami wyrobów medycznych do sterylizacji*Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.**Zdający kolejno:*

1	wykonał dezynfekcję stanowiska chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym						
2	wybrał z narzędzi znajdujących się na stanowisku: hak chirurgiczny Farabeuf, kleszczyki Allis, kleszczyki Kocher, odgryzacz kostny jednoprzegubowy oraz miskę nerkową						
3	skontrolował czystość pod lampą z lupą narzędzia: hak chirurgiczny Farabeuf, kleszczyki Allis, kleszczyki Kocher, odgryzacz kostny jednoprzegubowy oraz miskę nerkową						
4	naniósł olej do konserwacji wyłącznie na przeguby: kleszczyków Allis, kleszczyków Kocher i odgryzacza kostnego jednoprzegubowego						
5	po naniesieniu oleju wykonał narzędziami kilkukrotne ruchy zamykania i otwierania						

Numer
stanowiska

Przebieg 3: Pakowanie Zestawu zabiegowego oraz Miski nerkowatej

Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	zapakował: hak chirurgiczny Farabeuf, kleszczyki Allis, kleszczyki Kocher, odgryzacz kostny jednoprzegubowy w dwie warstwy rękawa papierowo-foliowego						
2	umieścił części chwytne narzędzi zgodnie z zaznaczonym na barierze sterylnej kierunkiem otwierania						
3	zapakował miskę nerkowatą w jedną warstwę rękawa papierowo-foliowego, dnem skierowanym w kierunku folii						
4	ułożył pakiety w koszu sterylizacyjnym pionowo folia do folii, papier do papieru						
5	uporządkował stanowisko pracy - nie pozostawił na blacie resztek rękawa papierowo-foliowego, wykonał dezynfekcję blatu stanowiska do pakowania narzędzi za pomocą chusteczki dezynfekcyjnej, chusteczkę umieścił w koszu na odpady						
6	zjął czepek i wyrzucił do kosza z czarnym/niebieskim workiem						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis