



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**

Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-16.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Karta zmian powierzchniowych na sprzęcie medycznym i narzędziach chirurgicznych.***Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryteriach pod warunkiem ich poprawności merytorycznej.*

1	W kolumnie Nazwa i ilość sprzętu medycznego/narzędzi chirurgicznych wpisane: kleszczyki jelitowe 1 szt., raspator 1 szt.						
2	W kolumnie Rodzaj nalotu/korozji przy kleszczykach jelitowych wpisane: korozja wżerowa						
3	W kolumnie Rodzaj nalotu/korozji przy raspatorze wpisane: naloty z soli wapnia pochodzących z wody lub osad wapienny						
4	W kolumnie Pochodzenie i przyczyny nalotu/korozji przy kleszczykach jelitowych wpisane co najmniej jedna z wymienionych: oddziaływanie jonów chloru lub bromu i jodu; na skutek pozostałości zabrudzeń organicznych - krwi, ropy, wydzieliny; zbyt duża zawartość chlorków w wodzie do płukania; fizjologiczne roztwory chlorku sodu; nowe narzędzia z cienką warstwą pasywną						
5	W kolumnie Pochodzenie i przyczyny nalotu/korozji przy raspatorze wpisane: zbyt duża zawartość wapnia w wodzie na etapie mycia lub ostatniego płukania						
6	W kolumnie Zalecenia dotyczące usunięcia nalotu/korozji przy kleszczykach jelitowych wpisane: zastosowanie kwaśnego środka do mycia zasadniczego lub mechaniczna obróbka u producenta lub renowacja lub kasacja						
7	W kolumnie Zalecenia dotyczące usunięcia nalotu/korozji przy raspatorze wpisane: przetarcie szmatką niepozostawiającą włókien lub poprzez kwaśne mycie zasadnicze						
8	W kolumnie Przykłady działań zapobiegawczych przy kleszczykach jelitowych wpisane minimum 2 z wymienionych: stosowanie wody odpowiedniej jakości (demineralizowanej); stosowanie wody z niewielką zawartością chlorku; redukcja pozostałości organicznych; usuwanie substancji zawierających chlor (krew, roztwór soli fizjologicznej); mycie bezpośrednio po użyciu; stosowanie do sterylizacji pary wolnej od zanieczyszczeń						
9	W kolumnie Przykłady działań zapobiegawczych przy raspatorze wpisane: płukanie końcowe wodą w pełni zdemineralizowaną lub mycie z ewentualnym płukaniem między etapami przy użyciu wody zmiękczonej						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Karta dekontaminacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych

1	W kolumnie Nazwa i ilość sprzętu medycznego/narzędzi chirurgicznych NIE wpisane: Korek do wenflonu						
2	W kolumnie Nazwa i ilość sprzętu medycznego/narzędzi chirurgicznych wpisane: Nożyczki chirurgiczne 3 sztuki						
3	W kolumnie Parametry procesu dezynfekcji dla wartości $A_0 = 6000$ w żadnym wierszu NIE wpisane: 90°C/5min.						
4	W kolumnie Czas sterylizacji w temperaturze 134°C wpisane trzy przykłady temperatur						
5	W kolumnie Protokół niezgodności został sporządzony, w wierszu Nożyczki chirurgiczne wpisane: TAK						

Rezultat 3: Protokół niezgodności oraz opisany test kontroli zgrzewu.*Zdający test kontroli zgrzewu pozostawi w miejscu wskazanym przez przewodniczącego ZN*

1	W tytule Protokół niezgodności z dnia... wpisana data egzaminu						
2	W wierszu Opis niezgodności wpisane: brak 2 sztuk/par nożyczek chirurgicznych						
3	W wierszu Podjęte działania wpisane: powiadomiono kierownika Centralnej Sterylizatorni lub powiadomiono kierownika/oddziałową/personel Bloku Operacyjnego lub wypisany Protokół niezgodności lub inne związane z wyjaśnianiem przyczyny lub stwierdzeniem niezgodności						
4	Test kontroli zgrzewu opisany datą egzaminu						
5	Test kontroli zgrzewu opisany uzyskanym wynikiem: wynik prawidłowy lub wynik pozytywny lub zaznaczone OK						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie testu kontroli zgrzewu oraz przygotowanie nożyczek chirurgicznych do sterylizacji w zakresie kontroli wizualnej, konserwacji, wykonania i oznakowania pakietu.

Zdający gotowość do wykonania testu kontroli zgrzewu oraz przygotowania nożyczek chirurgicznych do sterylizacji zasygnalizuje przez podniesienie ręki Przewodniczącemu ZN, który kieruje kolejno zdających do stanowiska.

1	Zdający zdezynfekował ręce, nie miał założonej żadnej biżuterii, założył czepek								
2	Zdający wykonał test kontroli zgrzewu przed zgrzaniem pakietu z nożyczkami chirurgicznymi								
3	Zdający obejrzał nożyczki chirurgiczne pod lupą powiększającą								
4	Zdający naniósł na nożyczki chirurgiczne w miejscu połączenia olej do konserwacji i następnie wykonał ruchy zamykania i otwierania								
5	Zdający na ostrza nożyczek chirurgicznych założył osłonkę								
6	Zdający uchwyty nożyczek chirurgicznych skierował w kierunku otwierania pakietu								
7	Zdający umieścił w pakiecie wskaźnik chemiczny								
8	Zgrzewy są ciągłe na całej ich szerokości, bez kanałów, folia nie jest pomarszczona								
9	Zdający do pakietu przykleił taśmą bez wskaźnika Etykietę z Datą ważności pakietu nie przekraczającą 6. miesięcy od daty egzaminu								
10	Zdający uporządkował stanowisko pracy, nie pozostawił na blacie stołu zużytych ręczników papierowych ani innych odpadów								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis