

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**  
**Rok 2017**  
**ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**  
 Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-17.01**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**  
 Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

 Kod ośrodka           –      

 Kod egzaminatora        

 Data egzaminu            
*Dzień Miesiąc Rok*

 Godzina rozpoczęcia egzaminu   :  

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Numer stanowiska					
		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>					
<b>Rezultat 1. Karta mycia i dezynfekcji</b>							
1	W kolumnie Nazwa zestawu wpisane: Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłęczkowania, Zestaw pęcherz, Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia						
2	W kolumnie Numer myjni dezynfektora/Numer wsadu we wszystkich wierszach wpisane: 1/782						
3	W kolumnie Parametry procesu dezynfekcji we wszystkich wierszach wpisane: 90°C/5 min.						
4	W kolumnie Wartość A0 we wszystkich wierszach wpisane: A0 = 3000						
5	W kolumnie Wynik testu mycia we wszystkich wierszach wpisane: Prawidłowy						
6	W kolumnie Zwolnienie wsadu we wszystkich wierszach wpisane: TAK						
<b>Rezultat 2. Karta sterylizacji</b>							
1	W kolumnie Nazwa zestawu wpisane: Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłęczkowania, Zestaw pęcherz, Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia						
2	W kolumnie Numer sterylizatora/Numer wsadu w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłęczkowania, Zestaw pęcherz wpisane: 1/920						
3	W kolumnie Numer sterylizatora/Numer wsadu w wierszach Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia wpisane: 2/821						
4	W kolumnie Parametry procesu sterylizacji temperatura/ciśnienie/czas wpisane: 134°C/210,0 kPa/4 min						
5	W kolumnie Wynik testu kontroli wsadu w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłęczkowania, Zestaw pęcherz wpisane: Prawidłowy						
6	W kolumnie Wynik testu kontroli wsadu w wierszach Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia wpisane: Nieprawidłowy						
7	W kolumnie Zwolnienie wsadu do użycia w wierszach Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłęczkowania, Zestaw pęcherz wpisane: TAK						
8	W kolumnie Zwolnienie wsadu do użycia w wierszach Zestaw przepuklina, Zestaw podstawowy do szycia wpisane: NIE						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3. Protokół przekazania zestawów operacyjnych na Blok Operacyjny oraz Etykieta**

1	W Protokole przekazania zestawów operacyjnych na Blok Operacyjny w wierszu Data wpisane: data egzaminu						
2	W Protokole przekazania zestawów operacyjnych na Blok Operacyjny w kolumnie Nazwa zestawu wpisane wyłącznie 3 zestawy: Zestaw do cięcia cesarskiego, Zestaw do wyłyżeczkowania, Zestaw pęcherz						
3	Wypełniona Etykieta, w wierszu Data ważności wpisane: trzy tygodnie od daty egzaminu						
4	Wypełniona Etykieta, w jednym z wierszy (lub w 2 wierszach) wpisane: Numer sterylizatora – 2, Numer wsadu (lub procesu lub cyklu) – 821						
5	Wypełniona Etykieta, w jednym z wierszy wpisane: Zawartość pakietu – Zestaw podstawowy do szycia						

**Przebieg 1. Kontrola czystości narzędzi, konserwacja narzędzi oraz wykonanie pakietu***Zdający sygnalizują gotowość do wykonania przez podniesienie ręki*

Zdający:

1	założył czepek oraz zdezynfekował ręce, na których nie miał biżuterii						
2	skompletował Zestaw podstawowy do szycia: nożyczki chirurgiczne – 1 szt., penseta chirurgiczna – 1 szt., pean – 1 szt., igłotrzymacz – 1 szt., a następnie używając lampy ze szkłem powiększającym (lub lupy) przeprowadził kontrolę czystości, otwierając narzędzia i oglądając je z każdej strony						
3	przeprowadził konserwację narzędzi, nanosząc środek w sprayu w miejscach połączeń (przegubów). Rozprowadził środek konserwujący, wykonując kilkukrotne ruchy zamykania i otwierania narzędzi						
4	rozłożył na blacie stołu dwa arkusze papieru krepowanego: jeden biały oraz jeden zielony i umieścił na środku – po przekątnej tacę z Zestawem podstawowym do szycia						
5	umieścił w pakiecie wskaźnik chemiczny typu 4. Zabezpieczył ostrza nożyczek chirurgicznych osłonką						
6	zapakował tacę narzędziową z Zestawem podstawowym do szycia w pierwszą warstwę papieru krepowanego, pozostawiając wypustkę						
7	Zdający obrócił pakiet o 180° i zapakował w drugą warstwę papieru krepowanego w innym kolorze. Zakleił pakiet taśmą ze wskaźnikiem sterylizacji parowej oraz taśmą bez wskaźnika (neutralną )						
8	zakleił pakiet po obu stronach wypustki						
9	do pakietu przykleił taśmą bez wskaźnika Etykietę						
10	uporządkował stanowisko pracy, poukładał materiały eksploatacyjne: taśmy do zaklejania pakietu, papier krepowany; nie pozostawił na blacie odpadów z taśmy ani tłustych plam; czepek wyrzucił do pojemnika na odpady						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*