



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**
Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-19.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający – wykonując zadanie egzaminacyjne – uzyskuje rezultaty w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie i z poleceniami zawartymi w treści zadania, to oceniaj jego działania pozytywnie oraz niezwłocznie zawiadom OKE, że zasady oceniania tego nie przewidują, mimo, że powinny.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonywaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Uwaga! Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryteriach oceniania pod warunkiem ich poprawności merytorycznej

Rezultat 1. Protokół niezgodności

1	W wierszu Opis niezgodności w zestawie Haki chirurgiczne, wpisane: brak 1 szt. haka rozwieracza, brak 1 szt. haka Farabeuf						
2	W wierszu Opis niezgodności w zestawie Narzędzia laryngologiczne, wpisane: brak 1 szt. wziernika usznego, brak 2 szt. wzierników nosowych						
3	W wierszu Opis niezgodności w zestawie Zestaw ginekologiczny, wpisane: brak 1 szt. kleszczyków okienkowych, brak 2 szt. skrobaczek, brak 1 szt. rozszerzacza Hegar						
4	W wierszu Opis niezgodności w zestawie Instrumentarium laparoskopowe, wpisane: brak 1 szt. trokara						
5	W wierszu Opis niezgodności w zestawie Akcesoria elektrochirurgiczne, wpisane: brak 1 szt. elektrody monopolarnej, brak 1 szt. elektrody bipolarnej						
6	W wierszu Opis niezgodności w zestawie: Sprzęt anestezjologiczny, wpisane: brak 2 szt. масечек twarzowych, brak 1 szt. масечки krtaniowej						

Rezultat 2. Karta procesów mycia i dezynfekcji

1	W wierszu Haki chirurgiczne, w kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu Tak/Nie wpisane: TAK						
2	W wierszu Narzędzia laryngologiczne, w kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu Tak/Nie wpisane: NIE						
3	W wierszu Zestaw ginekologiczny w kolumnie, Decyzja o zwolnieniu wsadu Tak/Nie wpisane: TAK						
4	W wierszu Instrumentarium laparoskopowe, w kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu Tak/Nie wpisane: TAK						
5	W wierszu Akcesoria elektrochirurgiczne, w kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu Tak/Nie wpisane: TAK						
6	W wierszu Sprzęt anestezjologiczny, w kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu Tak/Nie wpisane: NIE						

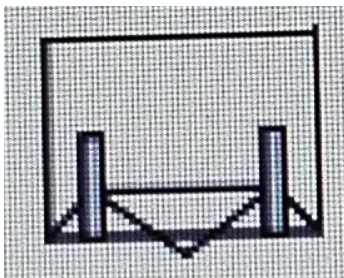
Numer
stanowiska

Rezultat 3. Karta procesów sterylizacji oraz pakiet z naklejoną Etykieta

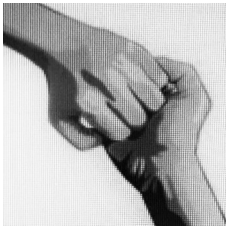
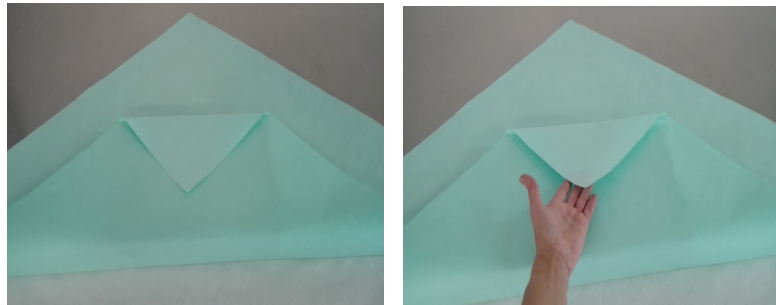
Karta procesów sterylizacji

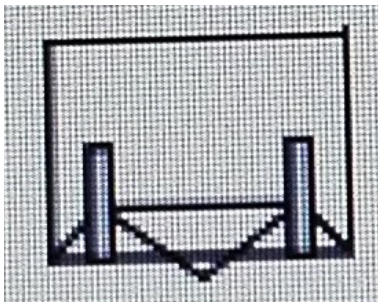
1	W kolumnie Nazwa zestawu wpisane: wyłącznie 4 zestawy: Haki chirurgiczne, Zestaw ginekologiczny, Instrumentarium laparoskopowe, Akcesoria elektrochirurgiczne						
2	W kolumnie Kontrola pakietu w wierszu Instrumentarium laparoskopowe wpisane: Nr 12 (lub Nr 6)						
3	W kolumnie Kontrola pakietu wpisane: Nr 8 dla Haków chirurgicznych, Zestawu ginekologicznego, Akcesoriów elektrochirurgicznych						
4	W kolumnie Kontrola wsadu w wierszu Instrumentarium laparoskopowe wpisane: Nr 6						
5	W kolumnie Kontrola wsadu w trzech wierszach wpisane: Nr 10 dla Haków chirurgicznych, Zestawu ginekologicznego, Akcesoriów elektrochirurgicznych						
6	W kolumnie Wskaźnik procesu w trzech wierszach wpisane: Nr 4						

Pakiet z naklejoną Etykieta

7	Etykieta, w wierszu Dopuszczalny czas przechowywania wpisane: dzień-miesiąc-rok, 5 lat od daty sterylizacji +/-2dni						
8	Etykieta, w wierszu zawartość pakietu wpisane: pean – 1 szt., kocher – 1 szt. (lub kleszczyki typu Pean – 1 szt., kleszczyki typu Kocher – 1 szt.)						
9	Pakiet jest zaklejony taśmą wskaźnikową lub taśmą neutralną oraz wskaźnikową. Taśma przyklejona jest po obu stronach wystającej wypustki. 						

Przebieg 1. Przebieg kontroli czystości i konserwacji narzędzi oraz wykonania pakietu*Zdający:*

1	Założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy.						
2	Nie miał lub zdjął z rąk każdą sztukę biżuterii: pierścionki, bransoletki, itp. Następnie wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap pięciokrotnie. W 4 etapie pocierał zewnętrzne części palców jednej dłoni o wewnętrzną część drugiej dłoni z palcami złączonymi, zmienił ręce. 						
3	Wybrał z zestawu narzędzi tylko 2 sztuki narzędzi: kocher oraz pean. Otwierając narzędzia kontrolował czystość wszystkich powierzchni.						
4	Po kontroli czystości naniósł środek konserwujący tylko w obrębie przegubów kochera oraz peana. Rozprowadził środek konserwujący poprzez wykonanie kilkakrotnych ruchów otwierania i zamykania narzędzi.						
5	Zapiął kocher oraz pean na pierwszy ząbek i ułożył na tacy narzędziowej. Na tacy umieścił również chemiczny wskaźnik zintegrowany/typu 5.						
6	Umieścił tacę narzędziową po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego w kolorze zielonym.						
7	Zawinął arkusz zakrywając tacę z narzędziami. Sformułował trójkąt. 						

		Numer stanowiska						
8	Pozostawił wypustkę papieru krepowanego zielonego. 							
9	Z papieru białego koloru również sformułował trójkąt (jak w kryterium 7) oraz po kolejnych krokach pakowania pozostawił wypustkę (jak w kryterium 8) 							
10	Uporządkował stanowisko pracy: zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym. Ułożył wszystkie materiały, z których korzystał, wyrzucił czepek do kosza z odpadami.							

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis